

この度は、アボネット製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お客様が安全に、そして快適にご使用いただくために、注意事項・お手入れの仕方・正しい着用方法を記載しました。

製品の都合上、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

取扱説明書や製品に関するご質問は、下記までお問い合わせください。

禁止・注意事項

《 禁止事項 》

- 本製品は頭部を保護するための帽子です。
 - ・頭部保護の目的以外でのご使用はおやめください。
 - ・頭部以外の部位に使用しないでください。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないでください。また、緩衝材やインナーを取り外して使用することはおやめください。製品の機能低下をまねき、事故の原因になります。
- あごひもをきつく締めすぎると首を圧迫し、大変危険ですとおやめください。事故の原因になります。
- 磨耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 本製品は頭部を保護するための帽子でありヘルメットではありません。
 - ・法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。
 - ・本製品をかぶってオートバイに乗車しないでください。乗車用安全帽ではございません。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。

《 注意事項 》

- 本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を吸収するものではありません。
- 局所的な高衝撃や、保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になると、脱げる恐れがあり、事故の原因となります。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用の前に医師に相談してください。
 - ・頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を確認のうえ正しく着用してください。また、乱暴に使用しないでください。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地の色移りする場合があります。

洗濯方法



① 出し入れ可能な緩衝材は必ず取り外してください。取り外した緩衝材は洗えません。



② 帽子を中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い（押し洗い）してください。



③ すすぎは水又はぬるま湯で十分に行った後、形を整えて陰干ししてください。



《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。



○乾燥機の使用

○強く擦る・もみ洗い

○漂白剤・有機溶剤の使用



○ドライクリーニング

○濡れたまま放置する

○他の衣類と一緒に洗う



株式会社
特殊衣料

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40
TEL:011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>