

# abonet<sup>®</sup> 取扱説明書

no.2089 abonet+JARI キャップデニム


- サイズ / 55-58cm
- 素材 / 表地：綿 65%、ポリエステル 35%（抗菌消臭） 裏地：ポリエステル 100%
- 重量 / 約 140g
- 緩衝材 / ポリエチレンビーズ（ソフト） 厚さ 最大約 10mm

## ○ 緩衝材について


帽子の内側にポケットがあり、中に緩衝材パーツが入っています。洗濯の際には取り外してください。

※ 頭頂部、前頭部、側頭部、後頭部、すべての緩衝材パーツが取り外し可能です。


### 《頭頂部》

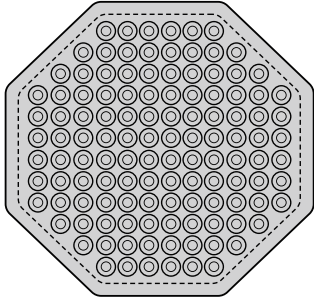


▲ 緩衝材パーツ（頭頂部）

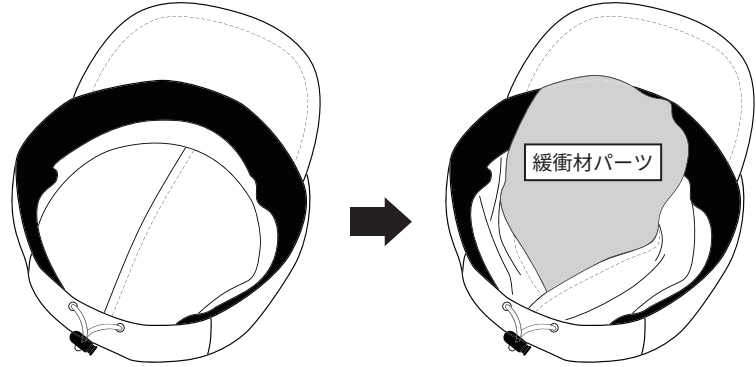

### 《前頭部・後頭部》

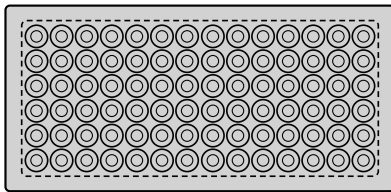


▲ 緩衝材パーツ（前頭部）

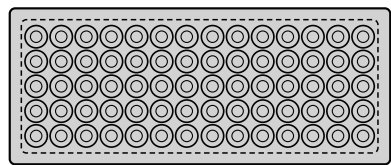


▲ 緩衝材パーツ（後頭部）


前頭部・後頭部のポケットの中央は、緩衝材パーツ固定のため一部縫い付けられています。緩衝材パーツを取り外す際は左右の隙間から出し入れしてください。

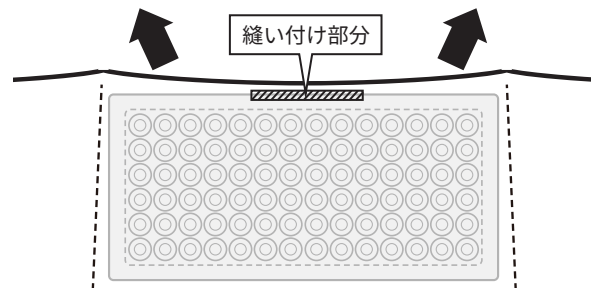

### 《側頭部》

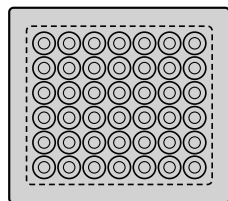

▲ 緩衝材パーツ（側頭部）

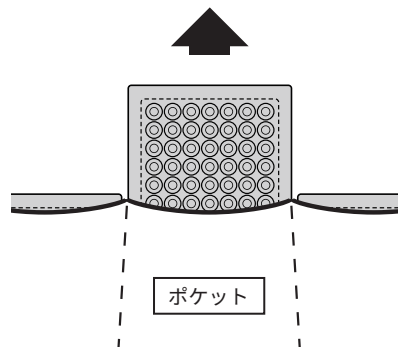

株式会社  
特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

TEL:011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>


# abonet<sup>®</sup> 取扱説明書

no.2089 abonet+JARI キャップデニム

- サイズ / 55-58cm
- 素材 / 表地：綿 65%、ポリエステル 35%（抗菌消臭）裏地：ポリエステル 100%
- 重量 / 約 140g
- 緩衝材 / ポリエチレンビーズ（ソフト）厚さ 最大約 10mm

## ○ サイズ調節方法

後ろのストッパーを指でつまみながら引っ張り、頭のサイズに合わせて調整してください。

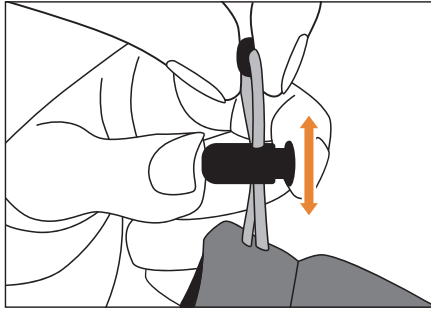


## ○ あごひもの取り付け方

本商品は別売りのクリップ式あごひもを取り付けることができます。

- ①クリップを矢印の方向へ倒します。
- ②帽子のふちを挟み、クリップを平らな状態に戻して使用します。



no.2095 クリップ式あごひもの開き方 (YouTube)  
URL : <https://youtu.be/B4ReybkLRv4>

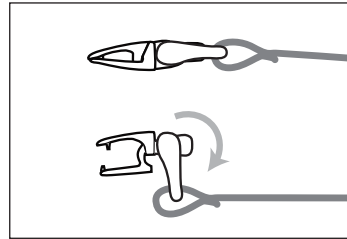

対象商品：no.2095 クリップ式あごひも

## 洗濯方法



- ①出し入れ可能な緩衝材を帽子から取り外します。（※緩衝材は洗えません。）
- ②中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い（押し洗い）してください。
- ③水又はぬるま湯で十分にすすぎ、形を整えて陰干ししてください。

### 《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- 強くこする・もみ洗い
- 漂白剤・有機溶剤の使用
- 濡れたまま放置する
- 他の衣類と一緒に洗う

### 《注意・禁止事項》必ずお読み頂いた上で、お使いください。

- 頭部以外の部位に使用しないでください。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないでください。
- 緩衝材やインナーを取り外して使用することはおやめください。
- あごひもをきつく締めすぎたり直接結ぶことは大変危険ですのでおやめください。
- 磨耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 本製品は頭部を保護するための帽子でありヘルメットではありません。法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。また、本製品をかぶってオートバイに乗車しないでください。乗車用安全帽とは別ものです。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。
- 本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を 100% 吸収するものではありません。
- 局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になられますと脱げたりする恐れがあり、事故の原因となります。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用前に医師に相談してください / 頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方 / アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を正しく使用し、また、乱暴に使用しないでください。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地の色移りする場合があります。



株式会社  
特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

TEL:011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>