

# abonet<sup>®</sup> 取扱説明書

no.2100 abonet ガードEタイプ

## ○ あごひもの使用方法

- ①あごひもの長さを調節してから、あごひもの端のバックルを留めます。(写真1)
- ②バックルは「カチッ」と音になるまで確実に留めてください。(写真2)



(写真1)



(写真2)

## ○ サイズの調整方法

- 後頭部の2カ所の面ファスナーで「頭囲」を調整できます。(写真3)



(写真3)

背面

## 洗濯方法



- ①あご紐・調節ベルトの面ファスナーをすべて留めてください。
- ②中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い（押し洗い）してください。
- ③すすぎは水又はぬるま湯で十分に行った後、形を整えて陰干ししてください。



### 《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- つよく擦る・もみ洗い
- 漂白剤・有機溶剤の使用
- ドライクリーニング
- 濡れたまま放置する
- 他の衣類と一緒に洗う



### 《注意・禁止事項》必ずお読み頂いた上で、お使いください。

- 頭部以外の部位に使用しないでください。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないでください。
- 緩衝材やインナーを取り外して使用することはおやめください。
- あご紐をきつく締めすぎたり、直接結ぶことは、大変危険ですのでおやめください。
- 磨耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本製品は頭部を保護するための帽子でありヘルメットではありません。法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。また、本製品をかぶってオートバイに乗車しないでください。乗車用安全帽とは別ものです。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。
- 本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を100%吸収するものではありません。
- 局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になられますと脱げたりする恐れがあり、事故の原因となります。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用の前に医師に相談してください / 頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方 / アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を正しく使用し、また、乱暴に使用しないでください。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣服につかないよう装着してください。

株式会社  
特殊衣料〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14条 14丁目 2-40  
TEL:011-663-0761 http://www.tomoni.co.jp/

TEL:011-663-0761 http://www.tomoni.co.jp/