


《注意・禁止事項》必ずお読み頂いた上で、お使いください。

- 頭部以外の部位に使用しないでください。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないでください。
- 本製品を火気および加熱したものの近くに置かないでください。
- 磨耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になると帽子が脱げる場合がございます。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用前に医師に相談してください / 頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方 / アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を正しく使用し、また、乱暴に使用しないでください。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地の色移りする場合があります。


※本製品は転倒保護を目的とした帽子ではないため、衝撃緩衝材は入っておりません。

《素材について》

○抗菌・抗ウイルス加工(クレンゼ[®])素材 / 綿100%
洗濯耐久性に優れており、抗菌・抗ウイルス効果は家庭洗濯50回後も確認済みです。

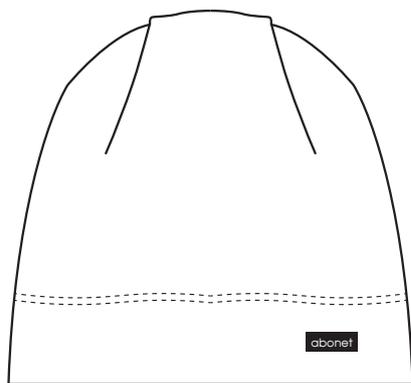

[前]

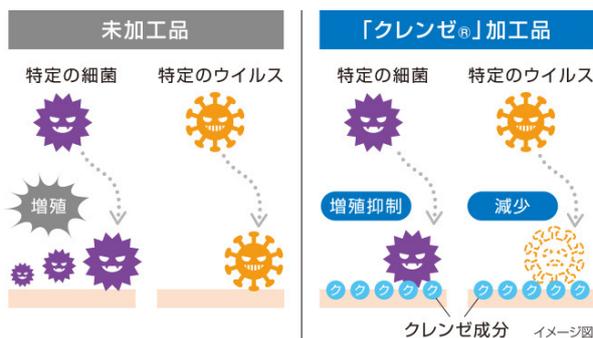

倉敷紡績株式会社(クラボウ)ホームページより

no.2051 abonetソフトスムーズキャップ1 抗ウイルス

●サイズ / S (50-54cm)、M (55-59cm) ●重量 / 約40g ●素材 / 綿100%

洗濯方法

- ①中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い(押し洗い)してください。
- ②水又はぬるま湯で十分にすすぎ、形を整えて陰干ししてください。



《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- 強くこする・もみ洗い
- 漂白剤・有機溶剤の使用
- 濡れたまま放置する
- 他の衣類と一緒に洗う



株式会社
特殊衣料

株式会社
特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒14条14丁目2-40
TEL:011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>