

no.2555 abonet サンバリア クールキャスケット

取扱説明書

帽子



品番	2555
カラー	ライトグレー / ブラック
サイズ	56-59cm
緩衝材	ポリエチレンビーズ（ハード）厚さ約10mm
リスク低減率	前頭部・側頭部・後頭部：80% ※頭頂部には緩衝材は入っておりません
素材	帽子：〔表地〕ポリエステル100%（遮光率・UVカット 99.99%以上） / 〔裏地〕ポリエステル100%（吸汗加工）
重量	約255g（帽子のみ：約190g）

クールパッド



凍った状態で帽子の内側に入れてご使用ください。
環境温度が28℃以下になると自然に凝固します。
冷水に浸けたり、冷蔵庫や冷凍庫で冷やすとより早く固まります。

サイズ	タテ約19cm×ヨコ約19cm
素材	〔外側〕熱可塑性ポリウレタン 〔内容物〕PCM（Phase Change Material）
重量	約65g
溶解点	28℃
完全溶解時間	約50分（38℃環境下）

仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

注意・禁止事項

- 頭部以外の部位に使用しないでください。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないでください。
- 本製品を火気および加熱したものの近くに置かないでください。
- 緩衝材やインナーを取り外して使用することはおやめください。
- あごひもをきつく締めすぎたり直接結ぶことは大変危険ですのでおやめください。
- 磨耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 本製品は頭部を保護するための帽子でありヘルメットではありません。法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。また、本製品をかぶってオートバイに乗車しないでください。乗車用安全帽とは別ものです。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。
- 本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を100%吸収するものではありません。
- 局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になられますと脱げたりする恐れがあり、事故の原因となります。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用前に医師に相談してください。
 - ・ 頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方
 - ・ アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を正しく使用し、また、乱暴に使用しないでください。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地の色移りする場合があります。
- 状態変化（固体⇄液体）を繰り返すため、多少形の変化がある場合がございますが、使用上問題はございません。
- 内容物が流出した場合は直ちに使用を中止してください。
- 内容物が手についたり、目に入った場合は直ちに水で洗い流してください。異常があらわれた場合は医師にご相談ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 保管する場合は内容物のかたより防止のため、できるだけ平らな場所に寝かせた状態にして保管してください。
- 口に含まないでください。
- お子様が使用される場合は親の目の届く範囲内でご使用ください。

お手入れ方法

- ① 中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い（押し洗い）してください。
- ② 水又はぬるま湯で十分にすすぎ、形を整えて陰干ししてください。



クールパッドが汚れた場合は水洗い※をし、水分をよく拭き取ってからご使用ください。

※洗濯機は使用しないでください。

お手入れ時の注意事項

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- 濡れたまま放置する
- 強くこする・もみ洗い
- 他の衣類と一緒に洗う
- 漂白剤・有機溶剤の使用



株式会社

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒14条14丁目2-40

TEL:011-663-0761 FAX:011-663-0955 <https://www.tomonico.jp>